

自律的な化学物質管理・マスクフィットテストなど職場の労働衛生に関することは
作業環境測定機関として<47年の実績>をもつオオスミにお任せください！

N95マスクをお使いの 医療従事者向け

＼ 職場の安全を支える /

マスクフィットテスト サービス

N95マスクとは？

- アメリカ合衆国労働安全衛生研究所(NIOSH)のN95規格をクリアし、認可された微粒子対応マスク
- 5 μ m以下の飛沫核に付着した病原体を捕集することができ、着用者の肺への病原体の進入を防ぐ

N95
マスク



N95マスクの一例

こんな時にフィットテストを行いましょう！

- ✓ N95マスクの導入時・オリエンテーション時
 - ✓ 定期的※なチェック
- ※ISOや米国 OSHA において、フィットテストは N95 レスピレーター導入時とその後は 1 年に 1 回とされています。

◆N95マスクの利用シーン◆

手術室・病棟・診察室等パンデミック対策の現場で働く人、結核・SARSなどの感染症陽性者に接する人、新型コロナウイルス感染症陽性者に接する人、インフルエンザ等の陽性者に接する人、感染症の検査を行う人、検査窓口の受け入れを行う人など

経験豊富なマスクフィットテスト実施者が行います！

選べる3つの実施方法

労働衛生コンサルタントや多数の労働衛生
セミナー講師実績を持つ技術者も在籍！

- ① 希望日にご指定場所で個別に実施<出張開催>
- ② 希望日に来社いただき個別開催(オオスミ本社/東京支店)
- ③ 定期開催日にご来社いただく(オオスミ東京支店セミナールーム)



上記写真は医療従事者のイメージです

開催形式	料金(税別)	備考
定期開催(オオスミ東京支店)	15,000円/人	開催日:2025年10月30日(木)、12月5日(金) 2026年2月26日(木)、4月23日(木)、6月25日(木)、8月27日(木)、10月22日(木)、12月4日(金)
出張開催(ご指定場所で開催)	20万円+交通費	5名まで(6名以上はプラス1万円/人) - 作業環境測定と同日に行う場合は特別料金で対応可能です。別途ご相談ください。
オオスミ社内で個別開催	18万円	オオスミ本社/東京支店、5名まで(6名以上はプラス1万円/人)

オオスミでは<定量的フィットテスト>を<短縮法>で行います

A) 使い捨て式の場合



B) 半面形, 全面形の場合



フィットテスト実施者に求められること

フィットテスト実施者の資格については法令上の定めはありません。しかし、フィットファクタの精度等を確保する為、十分な知識と経験を有する者が望ましいとされています。

- ・ フィットテスト方法や呼吸用保護具の知識
- ・ フィットテスターの操作方法や被験者を観察する能力
- ・ フィットテスト結果が不合格の時の推定要因を見つける力

ご依頼の際は

- 下記の情報をお知らせください

- 人数
- 全員の氏名・ふりがな(テスト結果に表示しますので、正確にお知らせください)
- 喫煙の有無
- それぞれのマスクメーカー、型番、サイズ

入力フォームをご用意しております。
営業担当までお申し付けください。

- 取替式マスクの場合、サンプリングアダプターの準備をお願いします。
(不明な場合はご相談ください)
- 使い捨て式のマスクの場合、サンプリングプローブを取り付けるため、
事前に送付ください。
- 出張測定の場合、会議室などの場所のご用意をお願いします。

採年(3年)	
マスクフィットテスト記録表	
テスト実施日：	テストレーサ：
使用装置：日本カノックス Aeroscanner Model 3000 J1 (S/N:R93166)	
テスト方法：BS-1810-2021(新規) ※箱形全箇所	
被験者	番号
	所属
	氏名
	メモ・備考
使用マスク	モデル セアル カナホ式1000型 F12
	タイプ タイブ 取替え式両面マスク
	サイズ サイズ M
	色フィッテータ 色フィッテータ >100
結果	合格基準 合格基準 100
	合格判定 合格判定 合格 ・ 不合格

動作	動作時間	フィッテータ		
		1回目	2回目(門スリ)	3回目(門スリ)
1.前屈	30 秒	>200	—	—
2.その場の駆け足	30 秒	>500	—	—
3.階段を右に下りる	30 秒	>200	—	—
4.頭を上下に動かす	30 秒	>500	—	—
全フィット係数		>200	—	—

ご相談は
お気軽に

「まずは内容を知りたい」「うちの事業所で実施する場合の提案をして欲しい」など、マスクフィットテストについて、ウェブまたは訪問にて詳細をご説明いたします。

オオスミ営業担当までお申し付けください。

※サービス内容は変更になる場合もあります。ご了承ください。

